



Dynasplint Systems®, Inc. Regionale kantoren:
770 Ritchie Highway Canada 1-800-668-9139
River Reach W21 La Jolla 1-800-262-8828
Severna Park, Nederland:
Maryland MD 21146-3937 31-(0)455230418
Bezoek onze website: www.dynasplint.nl

Instructies voor de patiënt - Metatarsophalangeale (MTP) Teen Extensie

Belangrijk: lees deze instructies zorgvuldig door, voordat u het Dynasplint® systeem gaat gebruiken. Het Dynasplint® systeem moet comfortabel zitten en goed passen. Wanneer u pijn, verstijving, zwellingen of huidirritatie voelt, moet u het Dynasplint® systeem meteen afdoen en niet meer aandoen. Als na het dragen van het Dynasplint® systeem een van deze symptomen zich voordoen of als de gewrichtsstijfheid, vergeleken met de voor u normale stijfheid, langer dan een uur aanhoudt, moet u het Dynasplint® systeem niet meer aandoen, tenzij men u anders heeft voorgeschreven. Raadpleeg meteen uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

1. De bovenste sluitbanden moeten geheel geopend worden.
2. Glijd het Dynasplint® systeem met geopende sluitbanden om de voet en let er daarbij op dat de dikke teen volledig aanligt op de thermoplastische steun en zich onder de tegendrukband bevindt. Ga na of het midden van het gewricht precies in het verlengde ligt van de dikke teen. Controleer de bevestiging aan de hand van het voorbeeld dat gegeven wordt in fig.1).
3. Maak de sluitbanden aan de bovenzijde dicht.
4. Controleer vervolgens of het Dynasplint® systeem goed aangebracht is en vergelijk met het voorbeeld van figuur 1. Let daarbij op het volgende:
 - a. De scharnieren moeten precies aan weerszijden van de dikke teen zitten.
 - b. De buizen dienen links en rechts naast de voet te lopen
5. Controleer de manchetten op nauwsluitendheid. Qua speelruimte, moet u een vinger tussen de bovenste sluitbanden en de tegendrukband kunnen schuiven. Bevestig de banden op de aangegeven plaatsen.
6. Controleer of het Dynasplint® systeem goed zit. De manchet moet rondom de hele voet gelijkmatig aansluiten.
7. U moet tijdens het dragen van het Dynasplint® systeem rustig en ontspannen zitten of liggen. Er mag geen zwaartekracht op de ledemaat rusten en het been dient bij voorkeur hoog gelegd te worden, zodat het zich op gelijke hoogte met uw hart bevindt.

Het is van belang om het kuitbeen op enigerlei wijze te ondersteunen (bijvoorbeeld met een kussen) om te voorkomen dat de buizen aan de onderzijde uitsteken, waardoor het systeem mogelijk naar voren kan schuiven. Met andere woorden: het systeem ligt niet goed aan, waardoor de teen van het thermoplastische steun af schuift.

Automatische vergrendeling scharnierpunt:

1. Schuif de knop van het vergrendelmechanisme in de

pijlrichting en houd hem in deze positie;

2. Draai het meegeleverde teenstuk in de gewenste stand en laat de knop los om te vergrendelen.

* **Waarschuwing:** Thermoplastisch materiaal uit de buurt van warmtebronnen houden

Thermoplastische onderdelen mogen niet opgeslagen of achtergelaten worden in ruimten waar ze blootstaan aan direct zonlicht en/of omgevingen met temperaturen van meer dan 50° C (bijvoorbeeld in een afgesloten auto tijdens een warme zomerdag) omdat ze daardoor vervormd kunnen raken.

Volg de instructies die uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut u geeft met betrekking tot de draagtijden. Schrijf uw commentaar dagelijks op het evaluatieformulier en bespreek uw commentaar met uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

© 2003 Dynasplint Systems® Inc.



Producten van Dynasplint Systems worden beschermd door een of meerdere van de volgende octrooien in de Verenigde Staten en andere landen: U.S. Patent Number 4.397.308, 4.485.808, 4.508.111, 4.538.600, 4.657.000, 4.944.290, 4.947.835, 5.014.690, 5.070.868, 6.413.231

Het product waarop het bijgesloten document betrekking heeft, is uitsluitend bedoeld voor het specifieke doel dat in de bijgeleverde instructies wordt beschreven. Enig ander gebruik van dit product dan voor het beoogde doel op enig ander lichaamsdeel of op enige andere manier dan wordt voorgeschreven door het protocol dat is vastgesteld door Dynasplint Systems, Inc., vormt een gebruik van het product waarvoor het bedrijf, zijn divisies noch zijn werknemers aansprakelijk kan worden gesteld. Enige aansprakelijkheid op grond van impliciete garanties inzake geschiktheid voor enig ander doel wordt uitdrukkelijk afgewezen.