



DYNASPLINT EUROPE

De Koumen 82, 6433 KE Hoensbroek,
Heerlen, The Netherlands.

Tel.: 31 - 45 5230418, fax: 31 - 45 5231303

Visit our website at www.dynasplint.nl

HET DOOR DE ARTS VOORGESCHREVEN BEHANDELSHEMA VOOR GEBRUIK VAN HET DYNASPLINT® SYSTEEM.

Dynasplint® Systeem protocol

Dit zijn enkel richtlijnen. Wanneer u pijn voelt, doe het Dynasplint® Systeem dan meteen af. Raadpleeg uw arts, therapeut en/of uw Dynamic Splint Consultant.

- De beginspanning/druk moet op schaal _____ gezet worden.
- De patient moet het Dynasplint®Systeem de eerste dag _____ uren dragen.
- Wanneer de patient na het dragen niet meer dan één uur ongemak voelt, dan mag de patient beginnen met het Dynasplint®Systeem 's nachts te dragen voor _____ uren.
- Wanneer de patient na de maximale draagtijd 's nachts niet meer dan één uur ongemak voelt, dan mag de spanning/druk elke paar dagen met een ½ aanduiding op de schaal verhoogd worden.
- De maximale spanning/druk is _____. Wanneer de maximale spanning/druk bereikt is, neem dan contact op met uw Dynamic Splint Consultant.

Dit basis protocol is om maximaal voordeel uit het Dynasplint®Systeem te halen. De druk/spanning sneller verhogen, garandeert niet dat de juiste rek bereikt wordt. Vergeet niet dat u het Dynasplint®Systeem in rust dient te dragen, bij voorkeur terwijl u slaapt, met gebruik van een kussen.

Uw volgend bezoek is op _____ Neem uw Dynasplint®Systeem en het navolgende, door u ingevulde evaluatieformulier mee.

Het door de arts voorgeschreven behandelprogramma voor gebruik van het Dynasplint® Systeem.
